



Pflegehinweise


Augenprothesen aus Glas

- Eine wöchentliche Reinigung des Kunstauges aus Glas wird empfohlen
- Es genügt, das Kunstauge vorsichtig (! Glas) zu entfernen und **in einer Schüssel** mit handwarmen Wasser zu spülen. Niemals unter dem laufenden Wasserstrahl des Lavabos (Bruchgefahr)!
- Verbliebene Schleimreste können mit einem feinen Tuch (z.B. Taschentuch) abgerieben werden.
- Anschliessend das Kunstauge mit Wasser befeuchten und einsetzen.
- Zusatzreinigung: Sollten sich hartnäckige Schleimreste auf der Glasprothese befinden, so lösen sich diese, wenn man das Kunstauge etwa 10 Minuten in Haushaltsessig (Salatessig) einlegt. Anschliessend gut abspülen.
- Wird das Kunstauge nicht getragen, sollte es in einem geschlossenen Behälter trocken aufbewahrt werden.
- Augenprothesen aus Glas sollten jährlich ersetzt werden

Augenprothesen aus Kunststoff

- Wir empfehlen, eine Augenprothese aus Kunststoff alle 2 Wochen zu reinigen.
- Es genügt, das Kunstauge vorsichtig aus der Augenhöhle zu entfernen und mit einem ph-neutralen Shampoo (z.B. Babyshampoo) zu reinigen.
- Anschliessend in lauwarmen Wasser gut spülen.
- Wird das Kunstauge nicht getragen, sollte es in einem geschlossenen Behälter trocken aufbewahrt werden.
- Augenprothesen aus Kunststoff sollten vom Fachmann jährlich poliert werden, um die Oberfläche aufzufrischen.
- Augenprothesen aus Kunststoff sollten nach 5 Jahren ersetzt werden.

EINSETZEN

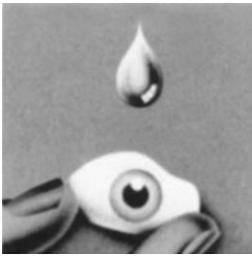

1. Das Kunstauge (KA) anfeuchten



2. Eine Hand zieht das obere Lid empor, die andere legt das KA auf das untere Lid



3. Das KA nun so weit wie möglich nach oben in die Augenhöhle schieben



4. Mit der oberen Hand
Mit der oberen Hand das KA in dieser Lage halten und mit der anderen Hand das Unterlid hervorziehen




5. Das Kunstauge setzt sich nun von selbst in die richtige Position

HERAUSNEHMEN



1. Blick nach oben richten und einen Zeigefinger auf das KA legen

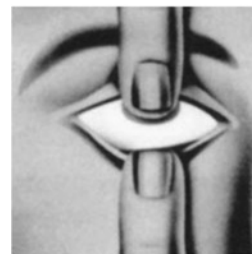


2. Mit dem anderen Zeigefinger das Unterlid hinter den unteren Rand des KA drücken

oder



ein stumpfes Stäbchen hinter den unteren Kunstaugenrand schieben und die Prothese vorsichtig herausheben

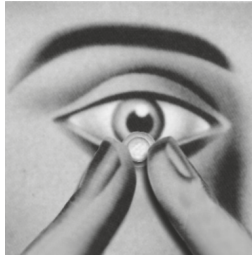

Mit einem Saugnapf j

- Benetzen Sie den Saugnapf mit Wasser
- Drücken Sie den Saugnapf zusammen und platzieren ihn satt auf der Prothese
- Lassen Sie den Saugnapf los, er sollte nun an der Prothese haften
- Nun ziehen Sie mit dem Saugnapf die Prothese vorsichtig heraus
- Wichtig: Drücken Sie den Saugnapf nicht zusammen, während Sie die Prothese herausziehen. Er verliert sonst das Vakuum und die Prothese könnte auf den Boden fallen

