



Conseils de soin

Yeux artificiels en verre

- Un œil artificiel en verre devrait être régulièrement nettoyé. Ainsi, il garde son aspect naturel et ménage l'orbite. Les résidus persistants et restant attachés à la prothèse se composent pour la plupart de liquide lacrymal ayant séché
- Il suffit de rincer régulièrement l'œil artificiel à l'eau froide
- Les traces laissées par la sécrétion des larmes peuvent être retirées avec un vinaigre ménager. Rincez ensuite soigneusement l'œil artificiel à l'eau
- La plupart du temps, une prothèse ophtalmique peut se porter jour et nuit. Si vous ne souhaitez pas procéder ainsi, l'œil est à conserver au sec dans une boîte remplie de coton
- Les yeux artificiels en verre doivent être remplacés tous les ans

Yeux artificiels en plastique

- Il est recommandé de nettoyer la prothèse oculaire en matière plastique toutes les 2 semaines
- Les résidus persistants peuvent être enlevés avec une lotion de nettoyage au pH neutre (shampooing pour bébé)
- Rincez ensuite soigneusement l'œil artificiel à l'eau
- La plupart du temps, une prothèse ophtalmique peut se porter jour et nuit. Si vous ne souhaitez pas procéder ainsi, l'œil est à conserver au sec dans une boîte remplie de coton
- Les prothèses en matière plastique devraient être repolies par un spécialiste chaque année.
- Les yeux artificiels en plastique doivent être remplacés tous les 5 ans.

MISE EN PACE



1. Humidifiez votre prothèse avec un peu d'eau



2. Soulevez d'une main/ d'un doigt la paupière mobile, l'autre main place la prothèse sur la paupière inférieure



3. Poussez maintenant l'œil artificiel aussi haut que possible dans l'orbite oculaire



4. Tenez l'œil artificiel avec le doigt de la main du haut et tirez avec l'autre doigt la paupière inférieure qui est derrière la prothèse



5. L'œil artificiel se placera ensuite tout seul dans la bonne position

RETRAIT




1. Regardez vers le haut et placez l'index sur l'œil artificiel




2. Glissez un doigt / crochet baton démoissé derrière le bord inférieur de l'œil artificiel et sortez la prothèse en la soulevant avec précaution



À l'aide d'une ventouse

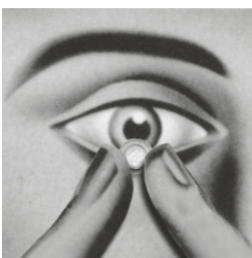

- Mouillez la ventouse avec de l'eau
- Appuyez sur la ventouse et placez-la fermement sur la prothèse.
- Relâchez la ventouse, elle devrait tenir à la prothèse

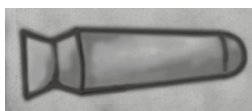

- Tirez désormais avec précaution sur la ventouse.
- Attention: n'appuyez pas sur la ventouse pendant que vous enlevez la prothèse. Elle perdrait son effet de succion et la prothèse pourrait tomber par terre