



Manutenzione

Occhi artificiali in vetro

- Ogni occhio artificiale si usura indossandolo. L'ambito lavorativo e privato, le condizioni della cavità oculare e anche la manutenzione della protesi influenzano la durata dell'occhio artificiale.
- Un occhio artificiale in vetro deve essere pulito regolarmente. In questo modo mantiene l'aspetto naturale e protegge la cavità oculare. I residui ostinati che rimangono sulla protesi sono costituiti nella maggior parte dei casi di secrezioni lacrimali secche. I residui ostinati, che rimangono attaccati alla superficie, sono composti per la maggior parte da lacrime essiccate.
- È sufficiente pulirli regolarmente con acqua fredda
- Nel caso delle protesi oculari in vetro, è possibile rimuovere i residui più ostinati immergendo le stesse protesi in aceto puro. Dopo di che gli occhi artificiali devono essere sciacquare nuovamente con acqua.
- Una protesi oculare può essere portata generalmente giorno e notte. Per chi non desidera portarla per un tempo così prolungato, è consigliabile conservare l'occhio artificiale in una custodia riempita di ovatta.
- Occhi artificiali in vetro devono essere sostituiti dopo un anno.

Occhi artificiali in plastica

- Ogni occhio artificiale si usura indossandolo. L'ambito lavorativo e privato, le condizioni della cavità oculare e anche la manutenzione della protesi influenzano la durata dell'occhio artificiale.
- Un occhio artificiale in plastica deve essere pulito ogni 2 settimane. In questo momento i residui più duri possono essere rimossi mediante l'utilizzo di un sapone dal ph neutro (shampoo per neonati). Dopo di che sciacquare adeguatamente.
- Una protesi oculare può essere portata generalmente giorno e notte. Per chi non desidera portarla per un tempo così prolungato, è consigliabile conservare l'occhio artificiale in una custodia riempita di ovatta.
- È consigliabile far lucidare le protesi in materiale plastico da un esperto ogni anno.
- Occhi artificiali in plastica vengono sostituiti dopo 5 anni.

INSERIMENTO



1. Umidificare la protesi con un po' d'acqua



2. Con una mano/un dito sollevare la palpebra superiore, mentre con l'altra mano posizionare l'occhio artificiale sulla palpebra inferiore



3. Spingere ora l'occhio artificiale più in alto possibile nella cavità oculare



4. Col dito della mano in alto tenere ora l'occhio artificiale e con l'altro dito tirare in avanti la palpebra inferiore



5. L'occhio artificiale si colloca da solo nella posizione corretta

ESTRAZIONE




1. Guardare verso l'alto e posizionare l'indice sull'occhio artificiale




2. Spingere un bastoncino / gancetto arrotondato dietro il bordo inferiore dell'occhio artificiale ed estrarre con cautela la protesi sollevandola



Con una ventosa

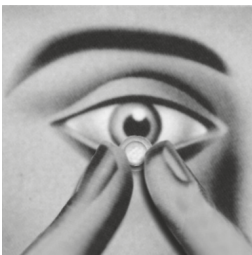

- Bagnare la ventosa con acqua
- Comprimere la ventosa ed attaccarla alla protesi
- Rilasciare la ventosa, dovrebbe ora aderire alla protesi

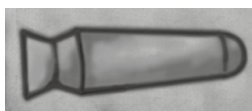

- Estrarre ora con cautela la protesi con la ventosa
- Importante: non comprimere la ventosa mentre si estrae la protesi, altrimenti perde la depressione al suo interno e la protesi potrebbe cadere al suolo.